

「スディベシ」「スディプラス」

弾性ストッキング

ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss


ご使用のしおり

ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss

§ "メディ" 弾性ストッキング (つま先付き) の着用方法 §

1. ストッキングの上部をあらかじめ足首の部分まで裏返し、ストッキングのかかとの向きに注意し、つま先からかかとまではきます。(図1参照)
2. ストッキングのかかとの部分を正しくあわせ、足の甲の部分にたるみがないことを確認してください。(図2参照)
3. ストッキングの上部を持ち、ストッキングのスタイルに応じて、ふくらはぎ、ひざ、ももまでゆっくり引き上げます。(図3参照)

この時、ストッキングがしわになったり、よじれたりせぬよう、爪や指輪などでストッキングを引っかけたりせぬよう、ご注意ください。
4. 引き上げるのが難しくなったり、脚の部分にたるみ、しわ、よじれができた場合は無理をせず、ストッキングの上部を裏返しに折り足首の部分まで引き下げ、脚の部分のたるみ、しわを上の方にゆっくりと平均に伸ばすようにしてください。
5. 慣れないうちは面倒かもしれませんが、着用のコツを覚えてしまうとスムーズに行えるようになります。 コツは力の入れ加減です。上へいくほど力を弱めて着用してください。

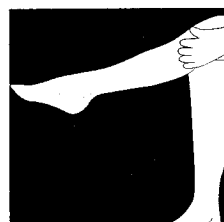

§ 洗濯方法 §



- ◎ 40℃前後のお湯に市販の洗剤を溶かし、洗濯機または手で押し洗いしてください。
洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用ください。
- ◎ よくすすいだ後、すぐ洗濯機から取り出し、軽く手でしぼってください。
濡れたままのストッキングをタオルなどにくるんだまま放置しないでください。
脱水機を使用する場合は、洗濯ネットに入れたまま脱水してください。
- ◎ 乾燥は陰干しにしてください。
乾燥機の使用はストッキングの生地を傷めることがあります。
- ◎ 柔軟仕上げ剤や漂白剤、ベンジンなどの使用、ドライクリーニング、アイロンかけはしないでください。
- ベルト付き片足ストッキングの洗濯時のご注意
ベルト部分のベルクロテープ (マジックテープ) は、留めた状態で洗濯して下さい。
外した状態で洗濯されますと、ベルクロテープが生地を傷つけることがあります。


★ "メディ" 弾性ストッキングは、出来るだけ回数多く洗ってください。

★ 軟膏、クリーム類を使用しているときは、一日一回、必ず洗ってください。

§ “メディプラス” 弾性ストッキング（つま先無し）の着用方法 §

1. 添付の“イージーオン” スリッパをはきます。（図1参照）
2. ストッキングのかかとの向きに注意し、つま先からかかとまではきます。（図2参照）
ストッキングの上部を持ち、ストッキングのスタイルに応じて、ふくらはぎ、ひざ、ももまでゆっくり引き上げます。ストッキングの上部を、あらかじめ足首の部分まで裏返しに折っておくと、はきやすくなります。

この時、ストッキングがしわになったり、よじれたりせぬよう、爪や指輪などでストッキングを引っかかりたりせぬよう、ご注意ください。
3. ストッキングの先端部分をかかとまでたぐり上げ、“イージーオン” スリッパをつま先から引き抜きます。（図3参照）
4. たぐり上げたストッキングの先端部分を引き戻します。（図4参照）
5. ストッキングのかかとの部分を正しくあわせ、平均して伸ばし、脚の部分にたるみがないことを確認してください。特に、足の甲の部分にたるみがないか確認してください。
6. 引き上げるのが難しくなったり、脚の部分にたるみ、しわ、よじれができた場合は無理をせず、ストッキングの上部を裏返しに折り足首の部分まで引き下げ、脚の部分のたるみ、しわを上の方にゆっくりと平均に伸ばすようにしてください。
7. 慣れないうちは面倒かもしれませんが、着用のコツを覚えてしまうとスムーズに行えるようになります。 コツは力の入れ加減です。上へいくほど力を弱めて着用してください。

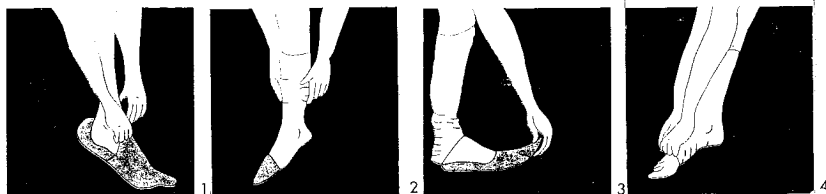

§ ご使用に際して §

- 必ず医師にご相談のうえ、着用してください。
- “メディ” 弾性ストッキングは起床と同時に着用し、入浴前または就寝前まで着用してください。
- 多汗性、脂性のお肌の方は、着用時に天花粉の使用をおすすめします。
また、生地を傷めないようゴム手袋などの使用をおすすめします。
- 伸びた爪や肌荒れはストッキングを傷めますので、お肌のお手入れにもお気をつけください。
靴の中敷などの内側のキズ、凹凸もストッキングを傷めます。ご注意ください。
- もし、ストッキングにほつれ、糸切れ等が発生しても、その部分は切り取らないでください。
伝線、穴明きなどの原因になります。
- アジャスタブルウエストバンド
バンディストッキングタイプにはウエスト調整バンドが付いています。適切な位置にボタン穴を合わせて着用してください。

★ 着用していて、シビレや痛みがある場合、また足先が白くなったり、うっ血した場合や下肢が発熱あるいは発赤した場合は、使用を直ちに中止し医師にご相談ください。

§ "メディ" 弾性ストッキングの特徴 §

- "メディベン" "メディプラス" は、ドイツの医療用弾性ストッキングメーカー、メディバイロイト社が開発し、ドイツ医療用品規格に準じて製造された製品です。
ドイツの品質検査機関である、ホーヘンスタイン研究所の品質検査合格品 (RALマーク付) です。
- 圧迫力は、足首の部分が最大で心臓に近くなるほど徐々に減少します。
足首の部分の圧迫度を100とした場合、膝下で最大70%、ももで最大50%、股下で最大40%の圧迫度となるよう編み上げています。コンピューター制御の編機で一足一足編み上げていますので、圧迫度はいつも一定です。
- 他社に類のない "アンコーティッド スパンデックス糸" を使用しているため、縦横双方向に伸縮性があります。耐久性、強度にも優れていますので洗濯機、脱水機の使用を可能にしました。
- サイズが I (SS) から VII (4L) まで、7段階に細かく設定されています。
ストッキングのスタイルも豊富です。ほとんどの方に適したスタイル・サイズが提供できます。
- 正しく使用すれば半年以上は有効な圧迫力を維持させることができますが、半年ごとに医師の診察を受け効果と圧迫力をご確認くださいよう、おすすめします。

§ "メディベン" 弾性ストッキング (つま先付き) の特徴 §

- クローズドトータライプ
一般スタイルのつま先付きストッキングです。
- クリマサーム (CLIMATEHERM) 機能付き
パンティ部は、通気性・透湿性に優れたマイクロ繊維を使用し、メディバイロイト社独自のニット技術で編み上げています。発汗によるパンティ部内の90%以上の湿気をすばやく外部に透過させる "クリマサーム機能" を持たせていますので、パンティ部内をいつも "クール & ドライ" に保ちます。夏は言うに及ばず冬の重ね着時も、快適に着用頂けます。
- 9色展開
よりファッショナブルな9色展開です。
ベージュ系2色、ブラウン系2色、グレイ系2色、ブラック、ネイビー、ホワイトの9色。
- 美しい色・光沢・透明感
レッグ部は、極細繊維を使用。今までにない美しい色や光沢、透明感があります。
- トップバンド付きストッキング
エレガントなレース付きです。ゴムレース裏面にシリコン加工を施してあり、ストッキングの滑り落ちを防ぎます。

§ "メディプラス" 弾性ストッキング (つま先無し) の特徴 §

- オープントータライプ
つま先が開いているストッキングです。
- トップバンド付きストッキング
ゴム裏面にシリコン加工を施してあり、ストッキングの滑り落ちを防ぎます。
- 片足ストッキング
ベルト付きの片足だけのストッキングです。一本のベルトで両足同時着用も可能です。
圧迫強度2 (30-40mmHg) と3 (40-50mmHg) の2タイプがあります。
- 強圧迫度パンティーストッキング
規格品で圧迫強度3 (40-50mmHg) のパンティーストッキングがあります。
- 片足パンティーストッキング
スタイルはパンティーストッキングですが、レッグ部は片足だけです。圧迫強度は3 (40-50mmHg) です。

製 造 元: ドイツ・メディバイロイト社
輸入総発売元: ナック商会株式会社
〒550-0003
大阪市西区京町堀2丁目2番11号
TEL: 06-6448-7581 (代)
FAX: 06-6448-7583

ナック商会株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀2-2-11 立誠社ビル

TEL: 06-6448-7581 FAX: 06-6448-7583

e-mail: info@nakcorp.co.jp

“メディ” 弾性ストッキング・スリーブ について

この度は“メディ” 弾性ストッキング・スリーブ をお買い上げ戴き厚くお礼申し上げます。

* 一度ご着用された商品の返品・お取り替えは致し兼ねますので、予めご了承下さい。

* 洗濯方法については、“ご使用のしおり”を参照願います。 手洗いがベストですが、洗濯機・乾燥機の使用も可能になりました。洗濯機をご使用の場合は洗濯ネットに入れて下さい。 乾燥機をご使用の場合は、60℃までの温度で乾燥させて下さい。(材質の性格上、湿気と高温に弱いのでご注意ください。) 又、軟膏、クリーム類をご使用の場合は毎日洗濯して下さい。

* 毎日のように洗濯をして戴いた方が、垢やほこり等で編目が目詰まり致しませんので、圧迫力をより長く維持できますし、ストッキング・スリーブ自体を長持ちさせる方法かと思えます。 圧迫力を弱める最大の原因は編目の目詰まりです。 毎日洗濯して頂く為には、履き替え用として、もう1足(双・枚)お持ちになり毎日交互に着用される事が最適だと思います。 このストッキング・スリーブは上手にご使用になれば6ヵ月位は圧迫力を維持するように作られております。(通常、治療の効果を高めるには4~6ヶ月毎に新しいストッキング・スリーブが必要とお考え下さい。 6ヶ月を過ぎますと、圧迫力は徐々に衰えてきますのでご注意下さい。)

* 弊社では、現在下記の弾性ストッキング・スリーブを取り扱っております。

		圧迫力 クラス		カラー
“メディ プラス”	爪先無しストッキング (オールラウンドで種類が豊富)	1.ライト	(2.4-2.8 kPa)	ベージュ・キャメル・ブラック
		2.ノーマル	(3.1-4.3 kPa)	ベージュ・キャメル・ブラック
		3.ストロング	(4.5-6.1 kPa)	ベージュ・キャメル・ブラック
“メディ エレガンス”	爪先付きストッキング (最も薄手タイプ)	1.ライト	(2.4-2.8 kPa)	9 色
		2.ノーマル	(3.1-4.3 kPa)	9 色
“メディ アクティブ”	ハイソックス (男女兼用)	2 ノーマル	(3.1-4.3 kPa)	ネイビー・ブラック
“メディ ラステックス”	爪先無しストッキング (廉価タイプ)	2.ノーマル	(3.1-4.3 kPa)	ベージュ
“メディフォルテ”	爪先無しストッキング (厚手タイプで抗菌仕様)	2.ノーマル	(3.1-4.3 kPa)	ベージュ
		3.ストロング	(4.5-6.1 kPa)	ベージュ
“メディ 550”	爪先無しストッキング (平編みシーム付、ベストな圧迫)	2.ノーマル	(3.1-4.3 kPa)	ベージュ
		3.ストロング	(4.5-6.1 kPa)	ベージュ
“メディ アーム”	スリーブ (基本的スリーブ)	1.ライト	(2.4-2.8 kPa)	ベージュ
		2.ノーマル	(3.1-4.3 kPa)	ベージュ
“メディ アーム 95”	スリーブ (薄手タイプ)	1.ライト	(2.4-2.8 kPa)	ベージュ
		2.ノーマル	(3.1-4.3 kPa)	ベージュ
“メディ 550”	スリーブ (厚手) (平編みシーム付、ベストな圧迫)	2.ノーマル	(3.1-4.3 kPa)	ベージュ
“スウィング”	サポートパンスト	70 デニール	(1.3-1.6 kPa)	7 色
		140 デニール	(2.1-2.4 kPa)	7 色
	トップバンド付サポートストッキング	70 デニール	(1.3-1.6 kPa)	6 色
	婦人用ハイソックス	140 デニール	(2.1-2.4 kPa)	3 色
	紳士用ハイソックス	280 デニール	(2.6-2.9 kPa)	3 色

“メディプラス”・“メディエレガンス”・“メディフォルテ”・“メディ550”(圧迫力クラス1を含む)は全商品オーダーメイドも承りますのでご相談ください。 又、スリーブの圧迫力 クラス1、2、3. 共にオーダーメイド出来ますが、“メディ550”の生地となります。スリーブの圧迫力 クラス3. ストロング(4.5-6.1 kPa)やストッキングの圧迫力 クラス4. エクストラ ストロング(6.5 kPa 以上)はオーダーメイドのみの対応となります。

今後共どうぞよろしくお願い申し上げます。