


弾性ストッキング着用補助具

ジョブスト® ストッキング ドナー


取扱説明書

本取扱説明書をいつでも参照できるような場所に保管し、必ず取扱説明書に従ってご使用ください。

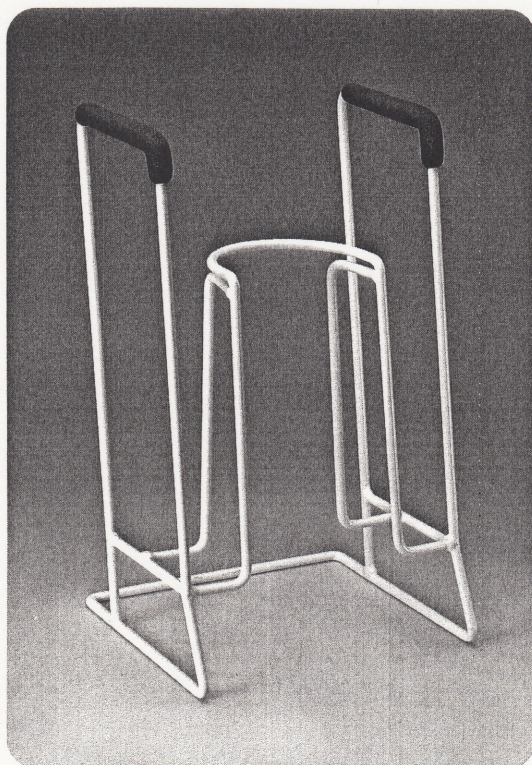


注意


- 弾性ストッキングを着用する目的以外に使用しないでください。
- 立った状態で使用すると、足元が不安定になるおそれがありますので、ご注意ください。

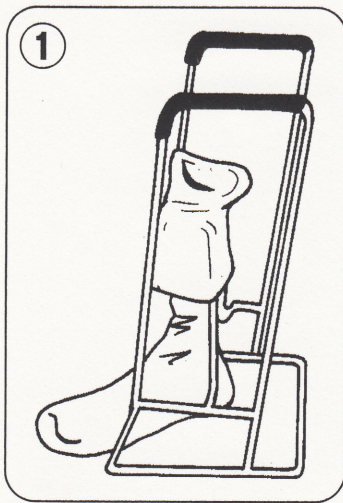


① 弾性ストッキングのつま先部が前方を向くよう、本品の半円状のフレームに装着します。

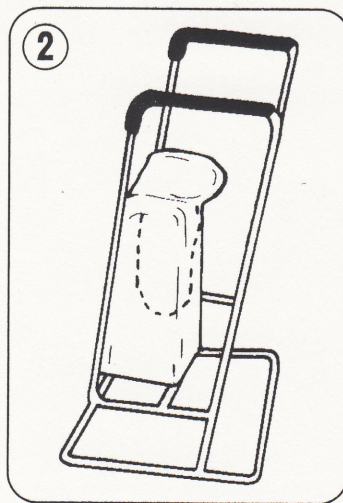


② 弾性ストッキングのかかとの部分が半円状のフレームの位置にくるまで弾性ストッキングの履き口を引き下げます。

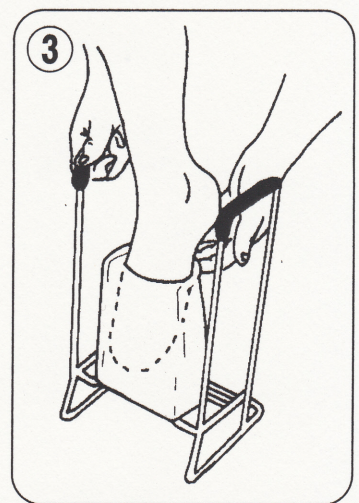


③ 弾性ストッキングのかかとの部分を引き、履き口を広げながら足を入れます。

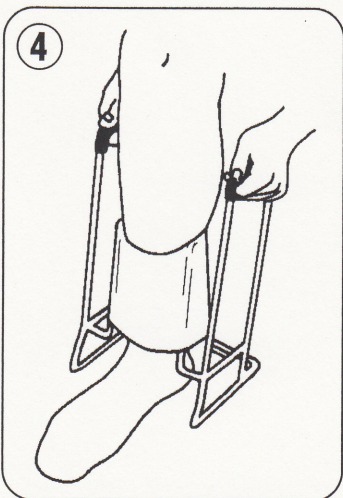

④ 左右のハンドルを持って、本品をゆっくりと適切な位置まで引き上げます。

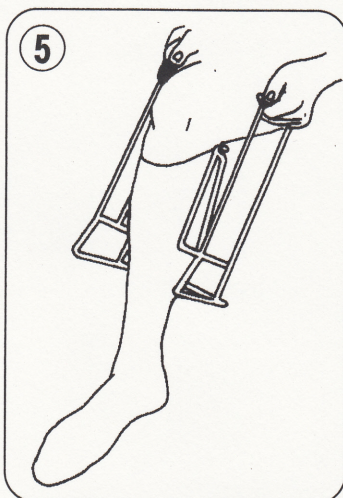

⑤ 本品を後方に引くと、弾性ストッキングから引き離すことができます。

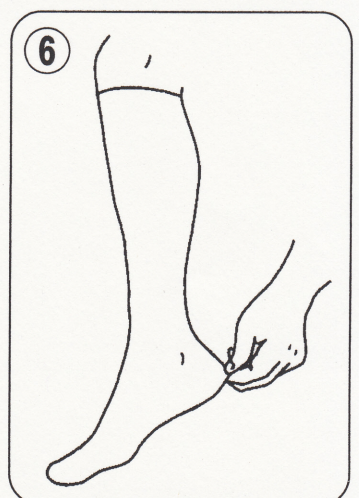

⑥ かかとの部分が適切に収まっているか、またシワやよじれなどを確認し調整します。

輸入元：テルモ・ビーエスエヌ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号
販売元：テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号
<http://www.terumo.co.jp/>

JOBST、ジョブストはビーエスエヌ・メディカル社(ドイツ)の登録商標です。
©テルモ株式会社 2006年10月